



Futuro[™] duimspalk Deluxe

Steurniveau: matig stabiliserend


Mensen met een drukke levensstijl maken veel gebruik van hun duimen. Pda's zijn onmisbaar geworden in onze maatschappij. Door deze communicatietoestellen en andere handhelds te gebruiken, kunnen uw duimen echter overbelast raken. De Futuro[™] duimspalk Deluxe helpt de onderste duimgewrichten te stabiliseren met comfortabele ondersteuning. U kunt de spalk de hele dag door dragen of alleen wanneer u hem echt nodig hebt. U zult ongetwijfeld het verschil voelen.

Aangewezen bij:

- Gewrichtsontstekingen.
- Overbelastingssyndroom.
- Degeneratieve ziekte van de duimgewrichten.

Speciale kenmerken:

Gepatenteerde duimspalk, open vormgeving maakt handbewegingen en natuurlijke houding van de hand mogelijk.

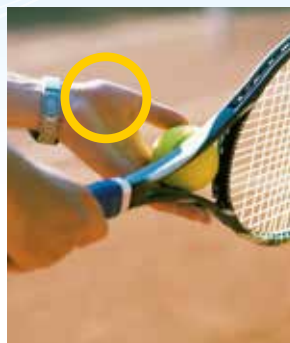


Bijkomende kenmerken en voordelen:

- Vrije beweging van de andere vingers.
- Gepatenteerd ontwerp en aanpasbare sluitingen voor perfecte pasvorm.
- Aanpasbare polssluiting voor extra steun.
- Twee metalen stabilisatoren voor stabilisering van de onderste duimgewrichten.
- Zachte, ademende, duurzame, latexvrije materialen voor draagcomfort.
- Gemakkelijk aan en uit te trekken.
- Geschikt voor linker- en rechterhand.




Gebruik

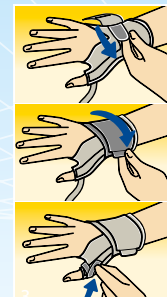

1. Open alle haaksluitingen en schuif de duim in het duimgat. Wikkel de bandage rond de hand en maak de sluiting vast op de basis van de pols. Maak vervolgens de duimriem vast.
2. Wikkel de lange riem rond de pols en maak hem vast. Trek alle sluitingen aan tot de duimspalk stevig en comfortabel zit.
3. De metalen spalken kunnen worden aangepast in de aanbevolen positie of volledig worden verwijderd voor meer gematigde steun.

Maten en bestelinformatie

Neem de maat zoals aangegeven op de afbeelding.

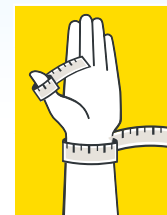

Afmetingen	Maat	Referentie	CNK CODE
5,0 - 6,3 cm (Duim) / 12,6 - 17,7 cm (Pols)	S/M	45841DAB	CNK 2403-558
6,3 - 7,8 cm (Duim) / 17,7cm - 23,0 cm (Pols)	L/XL	45842DAB	CNK 2403-541

Materiaal

Nylon, polyester, urethaanschuim, spandex

Wasinstructies voor Futuro[™] bandages

Met de hand wassen op 30 °C



Niet bleken, Niet strijken, Niet drogen in een droogmachine,
Niet chemisch reinigen

