

KELO-COTE®, EEN BREED GAMMA OM AAN UW BEHOEFTE TE VOLDOEN

HET GAMMA KELO-COTE®

Medisch hulpmiddel van klasse 1



Tube van 6 g

Bevat de nodige hoeveelheid om een litteken kleiner dan 7,5 cm te behandelen gedurende 2-3 maanden



Tube van 15 g

Bevat de nodige hoeveelheid om een litteken tussen 7,5 cm en 10 cm te behandelen gedurende 2-3 maanden



Tube van 15 g UV

Bevat de nodige hoeveelheid om een litteken tussen 7,5 cm en 10 cm te behandelen gedurende 2-3 maanden

Bevat zonnefilters met hoge beschermingsfactor (SPF 30)

GESCHIKT VOOR KINDEREN EN PERSONEN
MET EEN GEVOELIGE HUID⁽⁷⁾

KELO-COTE®: GEBRUIKSAANWIJZING



- Kelo-cote® in een dunne laag aanbrengen op een zuiver en droog litteken, 2-maal per dag
- 4-5 minuten laten drogen
- Het teveel aan Kelo-cote® verwijderen indien het product niet helemaal droog is
- De gel wordt enkel op een gesloten litteken aangebracht
- Aanbevolen behandelingsduur: 2-3 maanden



Slechts een kleine hoeveelheid Kelo-cote® gebruiken



Een dunne laag op het litteken aanbrengen



Niet wrijven 4-5 minuten laten drogen

Kelo-cote® UV wordt 30 minuten voor de blootstelling aan de zon aangebracht. Een zonnebrandcrème om de 2 uur of vaker indien nodig opnieuw aanbrengen.

Waarschuwingen: Direct contact met de ogen, het slijmvlies, de derdegraads brandwonden en open wonden vermijden. Kelo-cote® mag niet worden gebruikt op huidandoeningen die de integriteit van de huid aantasten. Kelo-cote® kan vlekken maken op de kleding indien de gel niet volledig droog is. Kelo-cote® is enkel bestemd voor uitwendig gebruik. Bij irritatie moet u het gebruik van Kelo-cote® stopzetten en een arts raadplegen. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Bewaren beneden 25 °C. Niet meer gebruiken na de uiterste houdbaarheidsdatum (EXP), die op de tube vermeld staat.

HEEFT U EEN LITTEKEN?
VRAAG RAAD AAN UW ARTS OF APOTHEKER



EEN MOOI LITTEKEN
IS EEN LITTEKEN DAT
JE VERGEET



Een gepatenteerde siliconenformule
voor preventie en behandeling van
hypertrofische littekens en keloïden

MEDISCH HULPMIDDEL KLASSE 1
VERKRIJGBAAR BIJ DE APOTHEEK

Foto: J-L Béro/DARE/10/084X - Januari 2014 - KEO/001

BIOCODEX Benelux

Meer informatie op www.kelo-cote.be



1 Bayat A, McGrouther DA, Ferguson MW. Skin scarring. BMJ 2003;326:88-92. 2 Mustoe TA, Cooter RD, Gold MH et al. International Clinical Recommendations on Scar Management. Plast Reconstr Surg 2002;110(2):560-571. 3 Patientengestuigenissen - www.kelocote.com. 4 English RS, Shenefelt PD. Dermatol Surg 1999; 25:631-638. 5 Sebastian G, Burbaum-Conradi H, Fischer S et al. Efficacy and Tolerability of a Novel Silicone Gel for Scar Treatment. Akt Dermatol 2004;30:450. 6 Signorini M, Clementoni MT. Clinical Evaluation of a New Self-Drying Silicone Gel in the Treatment of Scars: A Preliminary Report. Aesth Plast Surg 2007;31:183-187. 7 Sepehrmanesh M. Anwendungsbeobachtung mit DermatrixTM Gel an 1522 Patienten. Kompendium Dermatologie 2006;130-32.



UTTEKENS, HERKEN ZE VOOR EEN BETERE BEHANDELING

KELO-COTE® EEN ESTHETISCHE EN DOELTREFFENDE OPLOSSING

Na een wond (veroorzaakt door verwonding na ongeval, chirurgie, brandwonden, enz.) geneest de huid meestal door een blijvend, plat en licht gekleurd litteken achter te laten: men spreekt dan over een normaal of "rijp" litteken.

Maar als het genezingsmechanisme verstoord wordt, kan het litteken onsierlijk worden: men spreekt dan van abnormale littekens.

ABNORMALE UTTEKENS

WAT ZIJN DE MEEST VOORKOMENDE VORMEN?^(1,2)



- **Hypertrofische littekens** zijn verheven littekens met een rode kleur die kunnen jeuken.
- Ze beperken zich tot het verwonde gebied dat niet verder reikt dan het oorspronkelijk litteken en ze kunnen spontaan in regressie treden.
- Deze littekens treden meestal een paar weken na een operatie, verwonding of brandwonden op.



- **Keloïde littekens** vormen roodbruine blaasjes, die jeuken en pijnlijk kunnen zijn.
- Deze blaasjes hebben de neiging om uit te breiden naar de omliggende gezonde weefsels en treden niet spontaan in regressie.
- Deze littekens verschijnen meestal enkele maanden na de oorspronkelijke wond.

“ Na mijn keizersnede was het litteken erg gevoelig. Ik voelde mij ongemakkelijk, zelfs bij het dragen van wijde broeken...”

Sharon⁽³⁾



WELKE ZIJN DE FACTOREN DIE DE ONTWIKKELING VAN ABNORMALE UTTEKENS KUNNEN VEROORZAKEN?^(1,4)

Het risico op ontwikkeling van een abnormaal litteken hangt vooral af van de plaats van het litteken, het type huid en de leeftijd van de patiënt.

Abnormale littekens ontstaan meestal in de halsuitsnijding, op de rug, de benen, de schouders en de gewrichten.

Patiënten met een zwarte huidskleur en halfbloeden zijn genetisch voorbeschikt om abnormale littekens te vormen, meer bepaald het type keloïde.

Ook kinderen ontwikkelen gemakkelijker abnormale littekens.

Kelo-cote® is een gepatenteerde siliconengel voor preventie en behandeling van hypertrofische littekens en keloïden:

- Nieuwe of oude⁽⁵⁾
- Kleine of uitgebreide
- Na chirurgische ingrepen, verwondingen, brandwonden, ...




Kelo-cote®, productvoordelen:

- Vermindert de roodheid van littekens^(5,7)
- Maakt verheven littekens soepeler en platter^(5,7)
- Verlicht jeuk en pijn geassocieerd met littekens^(5,7)
- Transparante, reukloze siliconengel
- Droogt snel in 4-5 minuten
- Eenmaal droog kan Kelo-cote® worden bedekt met cosmetica of een zonnecrème
- Ideaal voor onregelmatige oppervlakken, het gezicht, de gewrichten en de huidplooien
- Het is niet nodig de te behandelen zone vooraf te scheren of te ontharen
- Geen maceratie effect dankzij de semi-occlusieve laag van Kelo-cote®



Kelo-cote®, een bewezen werkzaamheid^(5,6)

Na de behandeling verbetert Kelo-cote® aanzienlijk de symptomen geassocieerd met abnormale littekens (hypertrofische of keloïde): het litteken wordt zachter, witter, minder pijnlijk en de jeuk wordt minder.

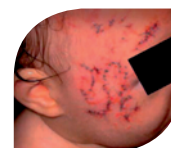

1 dag na het trauma



Na 3 maanden behandeling met Kelo-cote®



“ Kelo-cote® werkt! Mijn littekens vervagen geleidelijk. Bovendien is het een gebruiksvriendelijk product.”

TaNeshia⁽³⁾

OM HET PROBLEEM VAN ABNORMALE UTTEKENS AAN TE PAKKEN, BESTAAT ER NU EEN NIEUWE PRODUCTOPLOSSING ...