

RIGIDE ORTHESE VOOR 'S NACHTS

INDICATIES

De orthese voor 's nachts dagelijks dragen helpt gewrichtspijn aan de duimbasis te verzachten, en de ontwikkeling van rhizartrose te beperken.

FUNCTIONALITEIT

De rigide EPITACT® orthese houdt de duim in de ruststand door de weefselverbinding tussen de wijsvinger en de duim te openen. De orthese alligneert de botjes en zal daardoor de krachten op het zadelgewricht beperken en de pijn verzachten. De EPITACT® orthese is op maat gemaakt omdat ze thermovervormbaar is en bijgevolg dermate comfortabel dat u er tijdens uw slaap helemaal niet meer aan denkt.

GEBRUIKSAANWIJZING

Dit product is een orthese voor 's nachts.

Er zijn twee versies: rechterhand en linkerhand.

- THERMOVORMING:

Volg de meegeleverde handleiding voor thermovorming.

De orthese is, indien nodig, meermaals thermohervormbaar.

- AANBRENGEN:

- Trek de orthese aan door de duim door de daartoe bestemde opening te steken.
- Stop de klittenbandriem in de gesp aan de onderzijde van de duim, span de orthese licht aan rond de pols.

ONDERHOUD

- Wassen in de machine op 40 °C.
- Geen vlekkenverwijderaars gebruiken (aceton, oplosmiddel, etc.).
- Aan de lucht laten drogen. Niet strijken. Niet blootstellen aan warmte (>50 °C).

CONTRA-INDICATIES

- Het product heeft alle tests ondergaan die worden opgelegd door de ISO 10993-1-norm.

Indien zich desondanks een incident voordoet, het gebruik van het product onmiddellijk staken en MILLET Innovation op de hoogte stellen.

- Niet gebruiken op een onbeschermde wond.
- Bij ernstig oedeem: de hand tijdens het gebruik goed in de gaten houden. Het hulpmiddel verwijderen als het te strak zit en de bloedsomloop hindert. Bij twijfel uw arts of uw apotheker raadplegen.
- Niet gebruiken in de buurt van een vlam of een gloeiend voorwerp.

SAMENSTELLING: 53 % thermovervormbaar plastic, 47 % polyamide/elasthaan.

MILLET Innovation is niet aansprakelijk bij gebruik dat afwijkt van de aanbevelingen van de fabrikant.