

FICHE PRODUIT: PEDIAKID® SPRAY NEZ GORGE

FR /NL

PEDIAKID SPRAY NEZ-GORGE

Destiné à soulager les symptômes du rhume : dégage le nez et apaise la gorge

Spray 20 ml - embout nasal et buccal

- Facilite l'évacuation des mucosités
- Apaise les maux de gorge
- Limite la progression des infections virales et bactériennes
- Aux extraits de Plantes, Eau de Mer, Propolis & Cuivre

Bedoeld om verkoudheidsverschijnselen te verlichten: maakt de neus open en kalmeert de keel

Spray 20 ml – mondstuk voor neus en mond

- Vergemakkelijkt de afvoer van slijm
- Kalmeert keelpijn
- Beperkt de progressie van virale en bacteriële infecties
- Met extracten van planten, zeewater, propolis en koper

+PRODUIT / +PRODUCT

Dispositif médical destiné à soulager les symptômes du rhume – Action Douce, sans gaz propulseur – 2 embouts (1 nasal et 1 buccal).

Medisch hulpmiddel bedoeld om de symptomen van verkoudheid te verlichten - Zachte werking, zonder drijfgas - 2 mondstukken (1 nasaal en 1 oraal).

Description :

Dispositif Médical de Classe 1 - Ce dispositif Médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE

PEDIAKID® Spray Nez-Gorge associe une solution d'eau de mer légèrement hypertonique qui attire mécaniquement le liquide des muqueuses vers l'extérieur pour **nettoyer les voies aériennes supérieures et faciliter l'évacuation des mucosités ainsi que des microbes**. L'Aloe vera forme un film sur la muqueuse et la **protège des irritations, pour apaiser les maux de gorge et limiter la progression des infections**. Le **Spray Nez-Gorge PEDIAKID®** contient également des extraits d'Echinacée, de Propolis et de Cuivre, ainsi que des hydrolats d'Eucalyptus et de Romarin.

Fourni avec 2 embouts (nasal et buccal) pour une action douce 2 en 1. Sans gaz propulseur. Flacon spray de 20 ml

Beschrijving:

Klasse 1 Medisch hulpmiddel - Dit medische hulpmiddel is een gereguleerd gezondheidsproduct dat volgens deze voorschriften de CE-markering draagt

PEDIAKID® Neus-keel-spray combineert een licht hypertone zeewateroplossing die mechanisch vloeistof uit de slijmvliezen naar buiten trekt om de bovenste luchtwegen te reinigen en de afvoer van slijm en microben te **vergemakkelijken**. Aloë vera vormt een film over het slijmvlies en beschermt dit tegen **irritaties, om keelpijn te verlichten de progressie van infecties te beperken**. **Pediakid® Neus-keel-spray** bevat ook extracten van Echinacea, Propolis en Koper, evenals hydrolysaten van Eucalyptus en Rozemarijn.

Geleverd met 2 mondstukken (nasaal en oraal) voor een zachte 2-in-1 werking. Zonder drijfgas. 20 ml spuitfles

Ingrédients:

Eau distillée d'Eucalyptus (*Eucalyptus globulus*), eau de mer à base de sel de la mer morte, eau purifiée, eau distillée de Romarin (*Rosmarinus officinalis*), extrait d'Echinacée (*Echinacea angustifolia*), extrait de Propolis, épaississant : gomme xanthane, conservateur : sorbate de potassium, extrait d'Aloès (*Aloe vera barbadensis*), gluconate de cuivre, correcteur d'acidité : acide citrique.

Ingrediënten:

Waterdestillaat van Eucalyptus (*Eucalyptus globulus*), zeewater op basis van zout uit de dode zee, gezuiverd water, waterdestillaat van Rozemarijn (*Rosmarinus officinalis*), extract van *Echinacea angustifolia*, extract van Propolis, verdikkingsmiddel: xanthaangom, conserveermiddel: kaliumsorbaat, extract van Aloë (*Aloë vera barbadensis*), kopergluconaat, voedingszuur: citroenzuur.

Recommandations :

Lire attentivement les recommandations et conseils d'utilisation avant emploi. Ne pas utiliser en cas de sensibilité ou d'allergie à l'un des composants, ou en cas de traitement médical pour le nez ou la gorge, sauf avis contraire d'un professionnel de santé. Il est conseillé de prendre des précautions pour l'utilisation chez les nourrissons et les jeunes enfants en raison du format spray.

Aanbevelingen:

Lees voor gebruik de aanbevelingen en gebruiksaanwijzing goed door. Niet gebruiken in geval van gevoeligheid of allergie voor een van de componenten, of in het geval van medische behandeling voor de neus of keel, tenzij anders geadviseerd door een zorgverlener. Het is raadzaam om voorzorgsmaatregelen te nemen voor gebruik bij zuigelingen en jonge kinderen vanwege het sprayformaat.

Conseils d'utilisation :

- Pour le Nez : 2 pulvérisations dans chaque narine 2 à 3 fois par jour pendant 5 jours. Convient aux nourrissons.
- Pour la Gorge : 2 pulvérisations au fond de la gorge dès 30 mois, 3 à 4 fois par jour pendant 5 jours.

Gebruiksaanwijzing:

- Voor de neus: 2 sprays in elk neusgat 2-3 keer per dag gedurende 5 dagen.
Geschikt voor baby's.
- Voor de keel: 2 sprays aan de achterkant van de keel vanaf 30 maanden, 3 tot 4 keer per dag gedurende 5 dagen.

Laboratoires INELDEA 06510 Carros - France