

MERCUROCHROME PROTÈGE POINTES ORTEILS - 3790417

FR

➤ Description

Les protège-pointes pour orteils des Laboratoires Mercurochrome® limitent les frottements dans la chaussure au niveau des orteils grâce à leur gel polymère protecteur recouvert d'un tissu élastique et léger. Ils s'adaptent à toutes les tailles et formes de pieds* et aux chaussures.

*Taille unique 36-41 (EU) 2 protège-pointes pour orteils.

➤ Conseils d'utilisation et précautions d'emploi

Les protège-pointes conviennent à la fois au pied gauche et au pied droit. Enfiler chaque protège-pointe sur les orteils comme une chaussette. La couture doit se situer à l'extérieur du pied. Nettoyer les protège-pointes après utilisation à l'eau savonneuse, rincer et laisser sécher à l'air libre.

Utiliser ce produit maximum 16 heures par jour. Ne pas utiliser sur des plaies cutanées. Usage externe. Laisser hors de portée des enfants. En cas de DIABETE ou de troubles circulatoires des membres inférieurs, demander l'avis d'un professionnel avant utilisation. En cas de douleurs persistantes, consulter un médecin. Si le produit cause un inconfort, une rougeur cutanée, ou une augmentation de la douleur, stopper l'utilisation du produit et consulter un médecin. Une exposition à la lumière du soleil peut faire varier la couleur d'origine du produit.

NL

➤ Beschrijving

De beschermers voor de tippen van uw tenen van Laboratoires Mercurochrome® beperken de wrijving in schoenen ter hoogte van de tenen dankzij de beschermende polymeergel onder een lichte elastische stof. Ze kunnen worden aangepast aan alle maten en vormen van voeten* en aan schoenen. *Eén maat 36-41 (EU) 2 beschermers voor de tippen van uw tenen.

➤ Gebruiksadviezen en voorzorgsmaatregelen

De beschermers voor de tippen van uw tenen is geschikt voor zowel de linker- als de rechtervoet. Trek elke beschermer aan over de tippen van uw tenen, net als een sok. Het stiksel moet zich aan de buitenkant van de voet bevinden. Maak de beschermers voor de tippen van uw tenen na gebruik schoon met een zeepsopje, spoel af en laat aan de lucht drogen.

Gebruik dit product maximum 16 uur per dag. Niet gebruiken op huidwonden. Uitwendig gebruik. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Win het advies in van een zorgverlener voor gebruik van het product in het geval van DIABETES of stoornissen met de bloedsomloop van de onderste ledematen. Raadpleeg een arts in het geval van aanhoudende pijn. Als het product hinder, roodheid van de huid of een verhoogde pijn veroorzaakt, moet u het gebruik van dit product stopzetten en een arts raadplegen. Blootstelling aan de zon kan de kleur van het originele product doen verschillen.